



## How to set up your Kinsa thermometer



### STEP 1

#### Download the app

Search for “Kinsa” in your app store

Available in the App Store and Google Play!




#### Or scan this QR Code

Point your smartphone’s camera at the QR code to the right, and tap the link that appears.



Once you’ve downloaded the Kinsa app, launch it to get started!

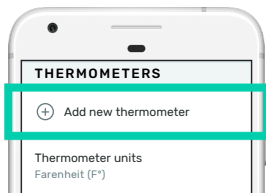


### STEP 2

#### Connect thermometer to Kinsa app

Tap the setting gear  at the top right corner of your screen, and then tap **Add new thermometer**.

Follow the instructions on your screen to connect your thermometer via  Bluetooth.

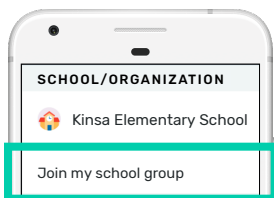

### STEP 3

#### Join your school group

1. Tap the setting gear  at the top right corner of your screen, and then tap **Join my school group**.
2. Search your school’s name.
3. After selecting your school, select the family members that you would like to add to the school. Specify their School Role and Grade. When you’re done, tap **SAVE**.



## Cómo configurar su termómetro



### PASO 1

#### Descargar el app


Buscar la aplicación de “Kinsa” en la app store

Disponible en App Store y Google Play!




#### O escanear el Código QR

Apunta con tu cámara hacia el código QR a la derecha y luego abre el link que aparece.

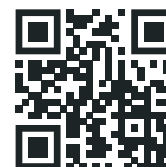

Una vez que haya descargado la aplicación de Kinsa, iníciela para comenzar.

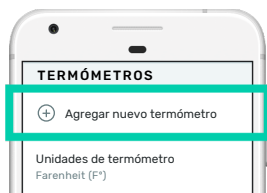


### PASO 2

#### Conecte el termómetro a la aplicación de Kinsa

Toca el engranaje de ajuste  en la esquina superior derecha de tu pantalla, y toca la opción **Agregar nuevo termómetro**.

Siga las instrucciones en la pantalla para conectar su termómetro via Bluetooth.

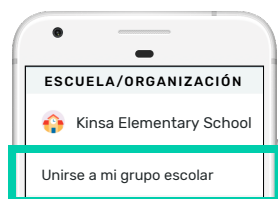

### PASO 3

#### Unirse a tu grupo escolar

1. Presiona el engranaje de Configuración en la esquina superior derecha **Unirse a mi grupo escolar**.
2. Busca el nombre de tu escuela.
3. Después de seleccionar su escuela, seleccione los miembros de la familia que le gustaría agregar a la escuela. Especifique su función en la escolar y grado. Toque SAVE.